

ROLATOR NA 4 KOTAČA



UPUTSTVO ZA UPORABU

Uvod

HE6104008P podesivi rolator je proizveden od plastificiranih čeličnih cijevi s ručkama podesive visine i četiri kotača.

Rolator je sklopiv i stoga se lako sprema i prevozi.

Rasklapanje i sklapanje rolatora

Rasklapanje:

Prihvatite ručku i pritisnite sjedište prema dolje dok se sva četiri kotača ne ispruže van, a sjedište ne bude potpuno ravno. Prije uporabe rolatora, sva četiri kotača moraju biti čvrsto na tlu, a rolator mora biti stabilan u otvorenom položaju.

Sklapanje:

Popustite mehanizam protiv sklapanja rolatora i podignite križnu polugu za sklapanje rolatora.

Podešavanje ručke

Popustite ručicu i postavite ručku na postavljenu visinu, zategnite i osigurajte ručicu.

Ponovite za ručku na suprotnoj strani. Ruke trebaju biti na istoj visini.

Provjeravanje/podešavanje kočnica

- Prije svake uporabe provjerite učinkovitost kočnica.
- Povlačenje kračuna na ručkama kočnica momentalno zaustavlja kotač.
- Pritiskanje ručki kočnica prema dolje kotač se zaključava na mjesto.
- Za podešavanje kočnica, koristite ključ za zatezanje matice dok istovremeno pridržavate maticu na kućištu sajle.
- Kočiona sajle trebaju biti pričvršćene uz noge rolatora. Sav višak kočionih sajli se mora ukloniti kroz prednju stranu rolatora.

Opres: Nakon svakog podešavanja kočnica rolatora, kočnice se moraju ispitati PRIJE uporabe rolatora.

Čišćenje

HE6104008P ROLATOR zahtjeva povremeno čišćenje mekanom krpom i mlakom vodom s deterdžentom. NE koristite žestoka abrazivna sredstva!

Održavanje

Svakodnevno, prije uporabe, provjerite okretanje kotača i slobodno manevriranje te nakupine nečistoća oko osovine. Provjerite rad kočnica. Povremeno provjeravajte zategnutost svih vijaka, matica i klinova.

Provjerite istrošenog pokretnih dijelova. Za podešavanje kočnica, koristite ključ za zatezanje matice dok istovremeno pridrđavate maticu na kućištu sajle.

Specifikacija

Maksimalna težina korisnika 130kg

Raspon visine ručke 76~97cm

Jamstvo

HE6104008P ROLATOR ima jamstvo na godinu dana od datuma kupovine koje pokriva kvarove uzrokovane u proizvodnji i materijalima. Kontaktirajte nas ukoliko dođe do bilo kakvog kvara.

Jamstvo NE pokriva troškove vezane uz popravak kvarova, posebice troškove vezane uz otpremu i prijevoz, gubitak dobiti, izdatke,...itd.

Proizvođač NEĆE prihvatiti odgovornost za nikakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu zlouporabom ili nepridrđavanjem prethodno navedenih uputstava.

JAMSTVENI LIST

NAZIV MODELA

SERIJSKI BROJ (vidi oznaku tipa na pomagalu)

DISTRIBUTER, DATUM I PEČAT

KARL DIETZ KIJEVO d.o.o.
Medicinska i ortopedska pomagala
Bajani 65 - 22310 Kijevo
T: 022 356 011 • M: info@kdk.hr

BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 234 500